

Susuz nemlendirmede ıęır aan bir geliřme

ResMed'in ilk susuz nemlendirme sistemi olan HumidX for AirMini ile tanışın. Bu sistem, hastalarınız için evde veya uzaktayken konforlu bir terapi deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.

Nemlendirme, ama bildiğiniz gibi deęil.

Hem basit hem de etkileyici olan HumidX teknolojisi, elektrik, su veya hantal bir nemlendiriciye ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, her nefes verişinizi daha sıcak ve daha doęal bir nefes alışverişine dönüřtürmek için benzersiz Isı ve Nem Deęişimi (HME) teknolojisini kullanır.

Burun ve burun yastığı maskeleri için HumidX ve ActiveAir teknolojileri sergileniyor.




Size ve hastalarınıza hizmet eden teknoloji

HumidX*, hastanın maskesinin havalandırma delięinin önüne yerleřtirilir ve havanın sıcaklığını ve nemini havalandırma delięinden dıřarı ıkmadan önce yakalar.*

ResMed'in ıęır aan ActiveAir™ teknolojisi, AirMini'de susuz nemlendirmeyi mümkün kılar. Bu teknoloji, havalandırma delięinin doęrudan AirMini maske sistemine entegre edilmesini ve konfor veya sızdırmazlıktan ödün vermeden HumidX'in ařaęısına yerleřtirilmesini saęlar.

HumidX teknolojisi řu anda AirFit™ P10 AirMini burun yastığı maskesi, AirFit N20, AirFit N20 Classic, AirTouch™ N20 ve AirFit N30 AirMini burun maskeleri ve AirFit F20 ve AirTouch F20 tam yüz maskeleri için mevcuttur.

ActiveAir vent sistem

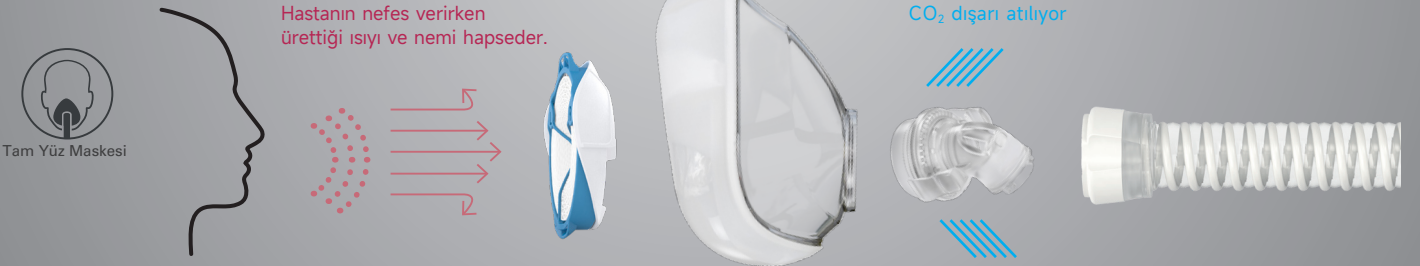

En iyi sonuçlar için 30 günde bir değiştirin. Görseller ölçekli değildir.

Nasıl Çalışıyor?

Hastalar nefes alıp verirken, her nefes verişten kaynaklanan ısı ve nem, HME'nin minik kağıt çıkıntıları içinde yakalanır ve depolanır.

Nefes aldıklarında ise bu ısı ve nem serbest bırakılarak gece boyunca sıcak ve rahat hava sağlanır.



Burun ve burun yastığı maskeleri için HumidX
ResMed'in çoğu iklim ve uyku ortamı için tasarlanmış standart susuz nemlendirme sistemi.



Burun ve burun yastığı maskeleri için HumidX Plus
Nem seviyelerinin çok düşük olduğu kuru iklimler ve yüksek rakımlı ortamlar (örneğin uçaklar) için optimize edilmiştir.

Teknoloji Yeniden Keşfedildi

Bazı hastane cihazları 50 yılı aşkın süredir susuz nemlendirme yöntemini kullanıyor.

ResMed'in HumidX'ini diğer CPAP susuz nemlendirme çözümlerinden ayıran şey, havayı maskenin havalandırma deliğine ulaşmadan önce bir değişim ünitesinden geçirmesidir. Bu sayede ısı ve nem kaybı en aza indirilir.



Tam yüz maskeleri için HumidX F20¹
ResMed'in çoğu iklim ve uyku ortamı için tasarlanmış standart susuz nemlendirme sistemi.

Ürün kodları

Burun ve yastıklık maskeleri için

HumidX 3PK	38809
HumidX 6PK	38810
HumidX Plus 3PK	38812
HumidX Plus 6PK	38813

Tam yüz maske

HumidX F20 3PK	38012
HumidX F20 6PK	38013

ResMed.com/HumidX adresinden HumidX hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.