

Havalı Minder (Köpük Takviyeli)

Model: RHM-01



KULLANIM KILAVUZU

Yastık, kullanıcının vücut şekline daha iyi uyum sağlayacak ve basıncı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Günde 15 saatten fazlasını yatakta geçirmesi muhtemel hastalar ve orta veya yüksek basınç ülseri riski olan hastalar için tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Uygun ritimdeki pnömatik yastık, kan damarları üzerinde hipoksiye neden olabilecek uzun süreli baskıyı önler.

Hava odaları, yastığı hastanın vücuduna ve pozisyonuna göre ayarlar.

KULLANIM İPUÇLARI

Basınç ülseri kontrolünün geleneksel olarak kabul edilen yöntemi, düzenli çalışan hava odalarını kullanarak kullanıcının vücudunu dengelemek ve basınç ülseri riski taşıyan vücut bölgelerinin sürekli gözlemlenmesini sağlamaktır. Pnömatik yastık bu tedavileri ve kullanıcı gözlemlerini tamamlar. Gerekirse kullanıcının vücut pozisyonunun değiştirilmesi tedavinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

İÇERİK

1. Valfli yastık
2. Kapak
3. Kullanım kılavuzu
4. Paketleme

KURULUM

1. Yastığı çıkarın.
2. Yere yerleştirin.
3. Valfi sökün, yastık kendiliğinden şişer.
4. Yastık tamamen şiştiğinde valfi kapatın.
5. Hastayı yastığa yerleştirmeden önce yastığın tamamen şiştiğinden emin olun.

GÜVENLİK UYARILARI

1. Yastığı keskin nesnelere uzak tutun.
2. Aşırı nemli odalarda kullanmayın.
3. Temizlemek için endüstriyel yağ gidericiler veya asetik çözücüler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
4. Yetkisiz ürün değişikliği risklidir.



DİKKAT! Bu üründe herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.



DİKKAT! Üreticinin izni olmadan bu üründe değişiklik yapmayın.



DİKKAT! Bu üründe değişiklik yapılması durumunda, ürünün güvenli kullanımını sağlamak için uygun incelemeler testler yapılmalıdır.



DİKKAT! Ürün, anestetiklerin hava veya oksijenle veya nitroz oksitle yamcı karışımlarının bulunduğu ortamlarda kullanıma uygun değildir.



DİKKAT! Kullanıcı, ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştığını kontrol etmeli ve kullanmadan önce uygun durumda olduğundan emin olmalıdır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

CE işaretli yüzeyler için üreticinin önerdiği kullanım konsantrasyonlarına uygun olarak deterjan veya deterjan/dezenfektan solüsyonuna batırılmış bir bez kullanın.

Yıkama :



Yastığı su ve nötr deterjanla yıkayın.
Yastığı nemli bir bezle silin.
Yastığı havayla kurutun.
Doğal deterjan dışında herhangi bir deterjan kullanmayın.
Yastığı çamaşır makinesinde yıkamayın.
Otoklav kullanmayın.
Yastığı güneş ışığından uzak tutun.
Vananın su ile temasından kaçının.



Makinede soğuk su ve çamaşır tozu veya yıkama sıvısı ile yıkayın.
Soğuk suyla durulayın ve hava ile kurutun.
Ütülemeyin.
Max. 20 kere yıkanabilir.

Saklama:

Yastığı güneş ışığına maruz bırakmayın.
10°C ile 40°C arasında ve kuru bir yerde muhafaza edin.
Nem aralığı: 10% ile 95%
Tüm spesifikasyonlar için 10%'a kadar tolerans olabilir.

TAŞIMA VE KULLANIM SIRASINDA NOTLAR



SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

	Uyarı
	Kırılabilir dikkatli taşıyınız
	Üst, devrilme
	Kuru bir yerde saklayın
	Kullanım talimatlarına bakın

DEPOLAMA VE NAKLİYE KOŞULLARI

Sıcaklık: 10°C - 40°C

Nem: 10% - 95% RH

Basınç yüksekliği: 86-106 kpa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 42cm x 42cm x 5cm

Max. kullanıcı ağırlığı: 150 kg

KULLANILAN MALZEME LİSTESİ

Yastık malzemesi: %100 PVC (polivinil klorür)

Alt kaplama katmanı: %100 PVC (polivinil klorür)

Alt kaplama katmanı: %100 polyester



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1 Avcılar/İstanbul

www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net

Tel: 444 78 96



Yayın tarihi: 04.04.2024