

ROLATÖR

MODEL:RR-02



Rolatörü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce yeni Rolatörünüzü tanımanız için bu talimatları dikkatlice okuyun. Rolatör, denge eksikliği yaşayan, hareket kabiliyeti sınırlı olan veya ameliyat sonrası yürüme desteğine ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ağırılık kapasitesi 120 kg'dır.

KULLANIM KILAVUZU




Kurulum ve Kullanım Videosu için For Installation and Usage Video **Taratiniz. Scan it.**



Tüm yedek parça listesi

1. Fren kolu
2. Destekleyici yapı
3. Katlanır mekanizma
4. Fren
5. Tekerlek
6. Ergonomik tutaç
7. Sürüş kolu
8. Destek
9. Koltuklar
10. Sepet veya çanta

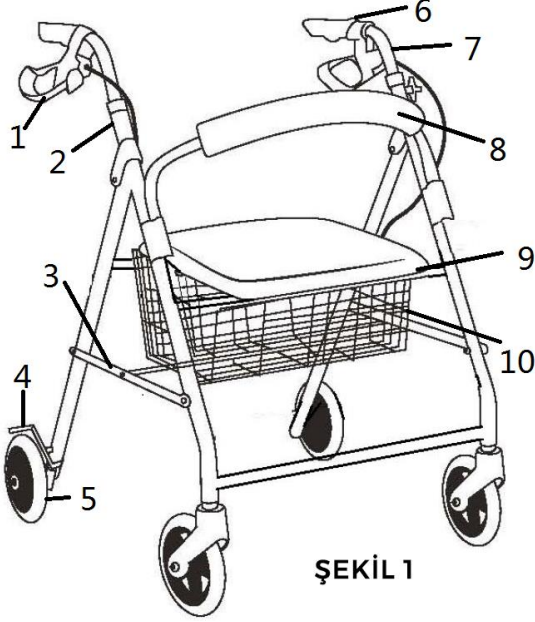

ŞEKİL 1

Rolator ile Nasıl Yürünür?

- 1). Tekerlekli sandalyenizi kendinizden yaklaşık bir adım ileriye koyun ve tekerlekli sandalyenizin bacaklarının yerle aynı hizada olduğundan emin olun.
- 2). Her iki elinizle destek için tekerlekli sandalyenin üst kısmını kavrayın ve yaralı bacağınızın üzerine basarak yürüyün. Sağlam bacağınızla adımınızı tamamlarken önce bu ayağınızın topuğunu yere değdirin, ardından ayağınızı düzleştirin ve son olarak ayak parmaklarınızı yerden kaldırın.
- 3). Rolatorünüzün ön demirine kadar adım atmayın. Döndüğünüzde yavaş adımlar atın.

Rolator Nasıl Oturulur ve Ayakta Durulur

- 1). Sirtınızı yavaşça Rolator'a dönün. El tutacağını iki elinizle kavrayın ve kendinizi biraz öne doğru eğin.
- 2). Ardından yavaşça yumuşak süngerli koltuğa oturun ve sirtınızı yumuşak süngerli sırt dayanağına yaslayın. Eller hala el tutacağını tutmaya devam eder. Otururken, yerçekiminizin hala önde olduğundan emin olun, aksi takdirde yürüteç geri düşecektir.
- 3). Ayakta dururken önce dik oturun. Ardından sağlam bacağınızla hafifçe bir adım atın. El tutacağını aşağı doğru itin ve aynı anda yavaşça ayağa kalkın.
- 4). Ayağa kalktıktan sonra yavaşça arkanızı dönün ve yüzünüzü yürüteçe çevirin..

Not: Oturmadan ve ayağa kalkmadan önce tekerlekli sandalyenin kilitli olduğundan emin olun.

Rolator Nasıl Katlanır?

- 1). Koltuğu kaldırın ve bastketi çıkarın.
- 2). Şeridi bir elinizle çekin ve katlarken tekerlekli sandalyenin düşmeyeceğinden emin olmak için diğer elinizle tekerlekli sandalyenin tutma yerini tutun.

Rolatorün Yüksekliği Nasıl Ayarlanır

- 1). El tutacağının altındaki yıldız şeklindeki yükseklik ayar vidasını çevirin.
- 2). Vidaları çıkardıktan sonra, sizin için en uygun yükseklikte bir delik seçin, ardından vidayı yeniden vidalayın.

Tavsiyeler ve önlemler:

1. Her zaman bir ayağınızı tambur yapısına yerleştirin.
2. Oturduktan sonra ayağa kalktığınızda, rolator kolunu çekmek yerine koltuktan ittirin.
3. Oturmadan önce frene basın ve rolatorün tekrar kullanılabilmesi için kaldırmadan önce frenin devreye girdiğinden emin olun.
4. Dönmek için kısa adımlar atın ve kalçaları ön silindirlere paralel tutun. Vücudunuzu silindirine diğer tarafına döndürmekten kaçınin.
5. Dönmek için küçük adımlar atın ve kalçalarınızı ön rolatorlere paralel tutun.

Vücudunuzu rolatörün diğer tarafına döndürmekten kaçının.

Lütfen Dikkat!

1. Lütfen kullanırken zemini kuru tutun!
2. Rolatörü uzun süre güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının, bu plastik parçaların kurummasını ve olası çatlamasını önleyecektir.
3. Hizmet sürelerini uzatmak istiyorsanız lütfen nemli ortamda veya sürekli olarak dış mekanda kullanmayın.
4. Tekerlekli sandalyeyi yürüyen merdivenlerde veya merdivenlerde kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Ürün temizliği: Yüzeyi yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.



www.cpapmerkezi.com

Adres: Tülin Cad. No:6A Zümrütevler Maltepe/İstanbul **Tel :** 05064502317

Yayın Tarihi:26.05.2023