

ÖZELLİKLE

Model	RSHM-0
Fonksiyonlar	Basınç tahliyesi
Uygulanan	Kapaklı oturma minderi /
Arayüz	Powertron Elektronik A.Ş. Giriş: AC 100V ~ 240V; 50/60 Hz; 2A Çıkış: DC 12V, 2A
Batarya	Li-Batarya 11.1V
Sıcaklık:	2200MAH
• Çalışma: 10 - 35°C	30 ~ 70
• Saklama: -15 - 50°C	10-15'e 20 dakika ayarlı
• Taşıma: -15 - 70°C	24 x 12,4 x 7,2
Nem:	Pompa 1110
• Çalışma: 20% - 80%	Adaptör 310
• Saklama: 10% - 90%	
• Taşıma: 10% - 90%	

SORUN

Pompa çalışmıyor	1	Pil kapasitesinin çok düşük olup olmadığını kontrol edin.
	2	Şarj edin.
	3	Pompayı AÇIK konuma getirmek ve doğru çalışıp çalışmadığını görmek için Güç Anahtarına (1)
	4	Pompa hala çalışmıyorsa yerel servis merkeziniz veya distribütörünüzle iletişime geçin.
Alarm durumunda	1	Yastık tüplerinin şişirme memelerine düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	2	Yastık tüplerinin düzgün şekilde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin. Herhangi bir yerde bükülmüşse tüpleri yeniden düzenleyin.
	3	Minderin hücrelerinde/içinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

RespiroX®

CE

Şarjlı Havalı Minder

Model:
RSHM-01



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1
Avcılar / İstanbul
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net
Tel : 444 78 96

