

# RTL-02 Hasta Transfer Lifti



**Hasta Transfer Lifti**

**Model: RTL-02**

**Kullanım Kılavuzu**



**ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1 Avcılar/İstanbul

[www.respirox.com.tr](http://www.respirox.com.tr) / [www.ecemedikal.net](http://www.ecemedikal.net)

Tel: 444 78 96



Yayın tarihi: 16.06.2026

# RTL-02 Hasta Transfer Lifti



## Ürün Genel Bakış

• Ürün Adı: Hasta Transfer Lifti

• Model No: RTL-02

• Kullanım Amacı:

Yatak, tekerlekli sandalye, tuvalet ve diğer yüzeyler arasında güvenli hasta transferi için tasarlanmıştır. Bakıcı üzerindeki yükü azaltır ve transferler sırasında düşme veya yaralanma riskini en aza indirir.

• Başlıca Özellikler:

- o Manuel hidrolik yükseklik ayarı
- o Güvenli konumlandırma için emniyet kemeri
- o Hareketlilik için kilitlenebilir döner tekerlekler
- o Kolay yan erişim için çıkarılabilir/katlanabilir kolçaklar
- o Konforlu dolgulu oturma yeri ve sırtlık

# RTL-02 Hasta Transfer Lifti



# RTL-02 Hasta Transfer Lifti



| İsim              | Bilgi                                               | Birim |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Çerçeve           | Çelik spreyci plastik çerçeve                       |       |
| Döşeme            | Oxford kumaş+PPC sünger su geçirmez bölünmüş yastık |       |
| Sırtlık           | Çıkarılabilir plastik sırtlık                       | CM    |
| Toplam Yükseklik  | 90-100                                              | CM    |
| Genel Genişlik    | 56                                                  | CM    |
| Koltuk Yüksekliği | 48-68                                               | CM    |
| Kolçak Uzunluğu   | 60                                                  | CM    |
| Sırt Genişliği    | 42                                                  | CM    |
| Taban Uzunluğu    | 70                                                  | CM    |
| Taban Genişliği   | 52                                                  |       |
| Teker Boyutu      | 3                                                   | inç   |
| Kaldırma Modu     | Ayakla çalıştırılan hidrolik kaldırma               |       |

# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

## RTL-02 nasıl monte edilir?

Adım 1: Tüm aksesuarları çıkarın ve çerçeve, oturma minderi, tekerlekler, klozet haznesi, yemek masası, sırtlık, hidrolik pompa ve vida takımı dahil tüm parçaları kontrol edin.



Adım 2: Tekerlekleri, taban çerçevesinin her iki ucundaki ayrılmış montaj delikleriyle hizalayın ve ardından sabitlemek için takın.



Adım 3: Tekerlekleri sağlam bir şekilde kilitlemek için her tekerleğin yanındaki sabitleme vidalarını sıkın.



# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

Adım 4: Resimde gösterildiği gibi sol ve sağı taraflara tüm tekerlekleri takmayı tamamlayın.



Adım 5: Bölünmüş oturma minderi tertibatını ana çerçevenin üst yuvalarına takın, konumlandırma deliklerini hizalayın.



Adım 6: Koltuk braketini sabitlemek için koltuğun altındaki ayar düğmesini sıkın.



# RTL-02 Hasta Transfer Lifti


Adım 7: Koltuk mindерinin montajı tamamen tamamlandı.



Adım 8: Koltuğun orta kilitleme tokasını takın, iki ayrı minder parçasını birbirine kilitlemek için kırmızı düğmeye basın.





Adım 9: Arka çerçevedeki ayrılmış delikleri hizalayın, çıkarılabilir plastik sırtlığı asın ve monte edin.

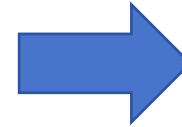


# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

Adım 10: Sırt dayanağını sağlam bir şekilde sabitlemek için her iki taraftaki sabitleme vidalarını sıkın, sırt dayanağı montajı tamamlandı.

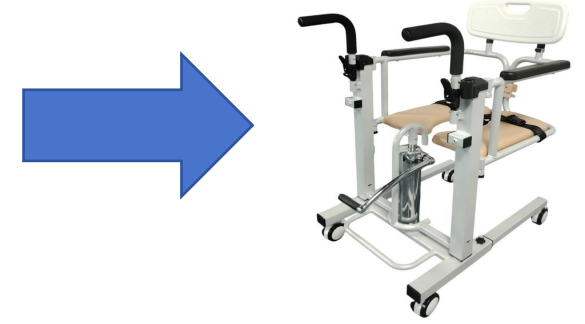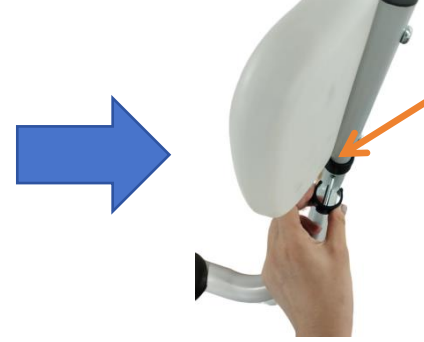

Adım 11: Ayak hidrolik kaldırma pompasını çerçevenin orta destek braketine takın ve sıkıca klipsleyin.

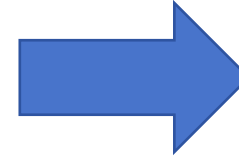

Adım 12: Klozet haznesini hidrolik pompanın altındaki tutucu braketeye yerleştirin.



# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

Adım 13: Çok fonksiyonlu yemek tepsisini kolçakın dış braketine takın, tepsiyi kilitlemek için yan düğmeyi çevirin.



Adım 14: Tüm parçalar tamamen monte edildikten sonra, hasta transfer koltuğu tamamen bitmiş ve kullanıma hazırdır.



# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

## Kurulum Kuralları

1. Bu kılavuzdaki tüm montaj adımlarını kesinlikle takip ederek monte edin.
2. Tüm vidaları, tokaları ve tekerlek bağlantılarını sıkıca sabitleyin.
3. Eksik parçalar, gevşek bağlantı elemanları veya tamamlanmamış montaj ile sandalyeyi asla kullanmayın.

## 2. Kullanım Öncesi Kontrol

1. Tekerlekleri kontrol edin: Tekerleklerin sıkışmadan düzgün bir şekilde döndüğünden emin olun.
2. Tüm kilit düğmelerini ve koltuk ayırma tokalarını güvenilir bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.
3. Hidrolik kaldırma fonksiyonunu test ederek yukarı ve aşağı hareketin düzgün olduğunu doğrulayın.
4. Çerçeve çatlak, deformasyon ve tüm kayışlarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
5. Herhangi bir kusurlu parça bulunursa montajı ve kullanımı derhal durdurun.

## 3. Montaj Güvenlik İpuçları

1. Çerçeve montajı sırasında ellerinizi sıkıştırmamak için eldiven giyin.
2. Parçaları zorla yerine takmayın; montaj için delikleri nazikçe hizalayın.

# RTL-02 Hasta Transfer Lifti

3. Kazara yaralanmaları önlemek için montaj sırasında çocukları uzak tutun.
4. Çerçevenin devrilmesini önlemek için düz ve temiz bir zeminde monte edin.

## 4. Değişiklik Yasağı

1. Orijinal çerçeve yapısını kesmeyin, delmeyin veya değiştirmeyin.
2. Değiştirme için yalnızca orijinal fabrika yedek parçalarını kullanın.
3. Yetkisiz herhangi bir değişiklik ürün garantisini geçersiz kılar.

## 5. Montaj Sonrası Test

1. Tekerlek stabilitesini test etmek için sandalyeyi ileri geri itin.
2. Kilitleme performansını kontrol etmek için koltuk tokasını tekrar tekrar kilitleyin ve açın.
3. Hidrolik performansı doğrulamak için sandalyeyi birkaç kez tamamen kaldırıp indirin.
4. Sırtlık ve yemek tepsisinin sallanmadan sağlam bir şekilde monte edildiğini doğrulayın.